

Multi-patients
Multi-tâches
Multi-thérapeutes



L'électrothérapie
sans fil

PHENIX

Multi-patients
Multi-tâches
Multi-thérapeutes



PLANNING & PROGRAMME 2019 / V1

FORMATIONS PHENIX

Lieu : Société VIVALTIS – Parc Eurêka - 200 rue de Thor
34000 MONTPELLIER

Durée : 2 jours

2019	
<u>Dates</u>	18 & 19 Janvier
	22 & 23 Mars
	24 & 25 Mai

Merci de prévoir une tenue sportive & légère permettant les exercices pratiques avec application cutanée des électrodes – des salles de soins sont disponibles pour les exercices pratiques

Première journée : vendredi : 8h30 - 18h00

- Branchements - Conseils d'utilisation – Précautions
- Association d'un POD (pour Gamme Liberty et Néo)
- Options de réglage

09h15 – 10h30 Exercices pratiques d'utilisation des appareils

- Lancer une séance de stimulation antalgique
- Lancer une séance de stimulation excito-motrice (tarage manuel – tarage automatique)
- Consulter le placement des électrodes - Consulter le contenu de la séance – Consulter les points moteurs
- Faire des modifications en cours de séance - Sauvegarder les modifications

10h30 - 10h45 : PAUSE

10h45 – 12h45 Exercices pratiques d'utilisation des appareils

- Lancer une séance de biofeedback (tarage - BFB négatif - 0 relatif - lissage - ludique)
- Faire des modifications en cours de séance
- Créer une fiche patient - Lancer une séance à partir de la fiche
- Enregistrer une séance - Relire une séance - comparer et analyser les courbes de biofeedback de plusieurs séances (quantité de travail / qualité de commande motrice)

12h45 – 14h00 : PAUSE DEJEUNER LIBRE

14h15 – 16h00 Exercices pratiques d'utilisation des appareils

- Utiliser l'Assistant thérapeutique
- Connaître les fonctions essentielles de la boîte à outils – Exercices pratiques

- Lancer une séance de stimulation et biofeedback
- Utiliser la stimulation conditionnelle - Utiliser la stimulation sur déclenchement EMG
- Dupliquer une séance et la modifier - Créer une séance de stimulation et biofeedback
- Créer une courbe de biofeedback -

16H00 : PAUSE

16H15 – 18h00 Exercices pratiques d'utilisation des appareils

- Lancer un bilan uro
- Réaliser un testing
- Réaliser une fiche de synthèse de la prise en charge à partir des bilans et testing
- Lancer un bilan neuro-périphérique
- Réaliser un courrier et l'adresser par mail au prescripteur avec des pièces jointes
- Associer un document à la fiche patient (bilan op., radio, etc.)

Deuxième journée : samedi 8h30 - 18h00

De 08H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H45 Savoir choisir et utiliser les programmes de traitement* PHENIX

Etudes de cas cliniques et proposition de travail en groupe avec **alternance entre 1 cas de pathologie URO et 1 cas de pathologie de l'appareil locomoteur : ½ heure pour chaque cas traité** (au total, entre 14 et 16 cas seront traités dans la journée)

Exemples de pathologies traitées

URO	Appareil locomoteur	Suppléments
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incontinence à l'effort – Hyperactivité vésicale – Incontinence mixte – Hypermobilité périnéale - Dyssynergie vésico-sphinctérienne, hypertonie périnéale, douleurs de l'épisiotomie – dyspareunies, etc. ➤ Réflexe de verrouillage périnéal conditionné et autonome : apprentissage et reconditionnement de la sensibilité des fuseaux neuromusculaires avec votre PHENIX ➤ Lomalgie et incontinence : évaluation diagnostique EMG de coactivation du transverse profond (mécanisme amplificateur hydraulique et force closure) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Œdème membre inférieur ➤ Œdème membre supérieur ➤ Syndrome de la coiffe des rotateurs (Stade 1, 2 et 3) : Drainage des œdèmes et micro hémorragies – mobilisation passive sous BFB - stimulation et travail sous BFB des muscles ajusteurs et des muscles effecteurs – utilisation du BFB pour l'apprentissage du recentrage physiologique ➤ LCA ➤ Syndrôme rotulien ➤ PSH... 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cas soumis par les participants
<p>Structure des cas : Anamnèse → Définition du plan de traitement avec le PHENIX → Programmes appréhendés dans ce plan de traitement</p>		

10H00 : PAUSE

12H30 – 14H00 : PAUSE DEJEUNER LIBRE

15H45 – 16H00 : PAUSE

17H45 : FIN DE LA FORMATION ET REMISE DES ATTESTATIONS DE PARTICIPATION

*Les programmes sont abordés comme des suggestions afin de placer l'utilisateur sur une voie de réflexion thérapeutique. Ils ne constituent en rien une solution de traitement qui relève de la seule décision thérapeutique du thérapeute.

VIVALTIS

Parc Euréka – 200 rue de Thor - 34000 Montpellier

Tél. : (33) 4 67 27 48 89 - Fax : (33) 4 67 27 15 49 - E-mail : serviceclient@vivalentis.com

S.A.R.L. au capital de 249 520 € Siret 42381946500034 APE 2660Z N° Intracommunautaire FR61423819465